

A-PRF™

CHOUKROUN Platelet Rich Fibrin



在離心結束時：

- 從離心機中取出試管，取下蓋子並將它們放入試管架。
- 如果凝塊尚未固化，請靜置5分鐘。
- 抓住紅色凝塊只保留纖維。

勿將管子留在機器中，也勿將管子中的凝塊留在試管中。



CLOT(凝塊)

- 單獨使用PRF為竇升高術 + 同時植入種植體
- 牙周囊袋 < 6mm
- 囊腫腔填充



MEMBRANE(膜)

- 覆蓋範圍
- 保護Schneiderian membrane
- 等效結締移植物
- 癒合基台兩披



PLUG(栓)

- 齒槽骨保存

S-PRF™

CHOUKROUN Platelet Rich Fibrin



黃頭管可以搭配紅頭管一起使用。

在離心結束時：

- 從離心機中取出試管，取下蓋子並將它們放入試管架。
- 使用2ml空針抽取上清液，直接進入試管中。

STICKY BONE(粘骨)



- 齒槽骨保存
- 引導骨再生
- 牙周囊袋 > 6mm



加速選項：

為了加速凝固，可在容器中添加凝塊。



LARGE MEMBRANE(大片膜)

- 擴展至大範圍覆蓋



加速選項：

為了加速凝固，可在容器中添加一片膜。

INJECTIONS

可注射的PRF液體可保持20至30分鐘。

注意勿搖動試管，因為這層可能會融合。



術前FLAP(瓣膜)注射



PAPILLA/ TMJ/ ENDO

i-PRF™

女性 - 3 min.

i-PRF M

男性 - 4 min.



AESTHETICS/ ORTHOPEDICS

i-PRF+™



- 面部美學 / 脫髮
- 軟骨再生
- 關節疼痛

